

Knijpmeter

Handeling Gegevens

De Knijpmeter is bepaald in ons bedrijf om nauwkeurig te lezen de meer of minder (+/-) een percent (1%) of de volle balans, (PG-10: 10 pond; of PG-30: 30 pond; of PG-60: 60 pond). Wanneer de knijpkracht toegepast wordt tegen het einde van de handvaten, de lezing zal enigzins hoger zijn.

Methodes:

1. Top Kneep – Duim uiterste top tegen wijsfinger top.
2. Sleutel Kneep – Duimtop tegen dwarszijde of de middel part van de wijsfinger.
3. Handpalm Kneep – Duim palm tegen top of de wijsfinger.

Voor meer uitvoerige informatie; zee B & L Engineering Web Site: www.bleng.com.

Handelwijze:

Om de knijpmeter naar het nulpunt te brengen, grijp de knop ring aan de wijzerplaat meter tot aan de nul en is rechtstreeks onder de Zwarte Wijzer. Om de rode uiterste kracht wijer terug te brengen naar nul, draai de kleine knop aan de top of de wijzerplaat in een linkse richting tot dat de Rode hand rust tegen de Zwarte Wijzer. Wanneer een knijpkracht is gemeten, de Rode handwil blijven op de hoogste lezing tot dat het opnieuw gezet is bij het draaien van de top knop. De Rode hand zal opnieuw gezet moeten worden voordat een andere kracht maatneming kan worden genomen.

Nota!

Astublieft, gebruik de veiligheidsriem! De wijzerplaat is een nauwkeurig, instrument dat is fijn gevoelig voor beschadiging als de Knijpmeter valt.

Waarschuwing!

1. *De Knijpmeter behoort niet te worden gebruikt bij een personen hoe sinds kort is gewond of had een operatie aan de hand zonden de begeleiding van een bekwaam Dokter.*
2. *De Knijpmeter behoort niet gebruikt te worden bij een persoon met brandwonden, of huiduitslag aan de hand zonder de begeleiding van een bekwaam Dokter.*

Als de knijpmeter neit nauwkeurig werkt; neem contact op met de fabrikant of een E U gemachtigde vertegenwoordiger voor informatie betreffende de knijpmeter; waar het gerepareerd en/of bugesteld.

Het is geadviseerd dat elke knijpmeter jaarlijks wordt gestuurd naar de fabrikant voor service!

Fabriek:

B & L ENGINEERING
(PINSO, INC.)
3002 DOW AVE., SUITE 416
TUSTIN, CA 92780
USA
TEL: (714) 505-9492
FAX: (714) 505-9493
www.bleng.com

EU Gemachtigde Vertegenwoordiger:

CHARWOOD DYNAMICS LTD.
VICTORIA MILLS
FOWKE STREET
ROTHLEY
LEICESTERSHIRE, LE7 7PJ
UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0) 161-230-10-60
FAX: +44 (0) 161-230-18-57

Dutch

Rev. 002 Dated: 08/07/02