

CALIBRATORE DEL PIZZICO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Il vostro Calibratore del Pizzico e' stato calibrato per indicare con un'esattezza del piu' o meno (+/-) uno per cento (1%) a piena scala (PG 10: 4.5 Kg, PG 30: 13.5 Kg, PG 60: 27 Kg.) la forza del pizzico al momento in cui viene applicata alle scanalature delle maniglie. Nel caso in cui la forza del pizzico viene concentrata sulle punte delle maniglie, i valori di lettura saranno leggermente piu' alti.

Metodi d'uso:

1. Presa di punta – punta del pollice contro la punta dell'indice.
2. Presa chiave – palmo del pollice contro parte laterale della falange media del dito indice.
3. Presa di palmo – palmo del pollice contro dito indice e medio.

Per maggiori informazioni e' consigliato visitare il web site di B&L Engineering: www.bleng.com

Operazioni:

Per azzerare il Calibratore del Pizzico, ruotare l'anello metallico situato intorno all'indicatore fino ad avere il **puntatore nero** direttamente allineato allo zero.

Per azzerare l'indicatore di forza massima (puntatore di colore **rosso**), ruotare la piccola manopola posta sulla parte superiore dell'indicatore, in senso antiorario fino ad avere il puntatore di colore **rosso** allineato a quello di colore **nero**. Una volta misurata la forza del pizzico, il puntatore **rosso** rimarra' nella posizione dell'ultima lettura fino al successivo azzeramento, che avverra' ruotando nuovamente la manopola superiore.

Il puntatore **rosso** deve essere riportato a zero prima di ogni misurazione di forza.

NOTA: USARE IL CINTURINO DI SICUREZZA! L' indicatore di forza del pizzico e' un delicato strumento di precisione che puo' riportare seri danni nel funzionamento nel caso dovesse essere lasciato cadere.

ATTENZIONE:

1. *Il Calibratore del Pizzico non deve essere usato da un soggetto con recenti operazioni o ferite alla mano senza il diretto consiglio del medico.*
2. *Il Calibratore del Pizzico non deve essere usato da un soggetto insensibile al tatto, con scottature alla mano o problemi alla pelle, senza il diretto consiglio del medico.*

Se il Calibratore del Pizzico non dovesse funzionare correttamente, contattare il Fabbriicante o il Distributore Autorizzato per l'Europa, riguardo informazioni inerenti la riparazione.

Si consiglia di inviare annualmente il Calibratore del Pizzico al distributore per la calibrazione.

Fabbricante:

B & L ENGINEERING
(PINSKO, INC.)
3002 DOW AVE., SUITE 416
TUSTIN, CA 92780
USA
TEL: (714) 505-9492
FAX: (714) 505-9493
www.bleng.com

Rappresentante Autorizzato Europa:

CHARWOOD DYNAMICS LTD.
VICTORIA MILLS
FOWKE STREET
ROTHLEY
LEICESTERSHIRE, LE7 7PJ
UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0) 161-230-10-60
FAX: +44 (0) 161-230-18-57