

CALIBRATORE DEL PIZZICO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Il vostro Calibratore del Pizzico e' stato calibrato per indicare con un'esattezza del piu' o meno (+/-) uno per cento (1%) a piena scala (PG 10: 4.5 Kg, PG 30: 13.5 Kg, PG 60: 27 Kg.) la forza del pizzico al momento in cui viene applicata alle scanalature delle maniglie. Nel caso in cui la forza del pizzico viene concentrata sulle punte delle maniglie, i valori di lettura saranno leggermente piu' alti.

Metodi d'uso:

1. Presa di punta – punta del pollice contro la punta dell'indice.
2. Presa chiave – palmo del pollice contro parte laterale della falange media del dito indice.
3. Presa di palmo – palmo del pollice contro dito indice e medio.

Per maggiori informazioni e' consigliato visitare il web site di B&L Engineering: www.bleng.com

Operazioni:

Per azzerare il Calibratore del Pizzico, ruotare l'anello metallico situato intorno all'indicatore fino ad avere il **puntatore nero** direttamente allineato allo zero.

Per azzerare l'indicatore di forza massima (puntatore di colore **rosso**), ruotare la piccola manopola posta sulla parte superiore dell'indicatore, in senso antiorario fino ad avere il puntatore di colore **rosso** allineato a quello di colore **nero**. Una volta misurata la forza del pizzico, il puntatore **rosso** rimarra' nella posizione dell'ultima lettura fino al successivo azzeramento, che avverra' ruotando nuovamente la manopola superiore.

Il puntatore **rosso** deve essere riportato a zero prima di ogni misurazione di forza.

NOTA: USARE IL CINTURINO DI SICUREZZA! L'indicatore di forza del pizzico e' un delicato strumento di precisione che puo' riportare seri danni nel funzionamento nel caso dovesse essere lasciato cadere.

ATTENZIONE:

1. *Il Calibratore del Pizzico non deve essere usato da un soggetto con recenti operazioni o ferite alla mano senza il diretto consiglio del medico.*
2. *Il Calibratore del Pizzico non deve essere usato da un soggetto insensibile al tatto, con scottature alla mano o problemi alla pelle, senza il diretto consiglio del medico.*

Se il Calibratore del Pizzico non dovesse funzionare correttamente, contattare il Fabbricante o il Distributore Autorizzato per l'Europa, riguardo informazioni inerenti la riparazione.

Si consiglia di inviare annualmente il Calibratore del Pizzico al distributore per la calibrazione.

Fabbricante:

B & L ENGINEERING
(PINSKO, INC.)
1901 CARNEGIE AVE., SUITE Q
SANTA ANA, CA 92705
USA
TEL: (714) 505-9492
FAX: (714) 505-9493
www.bleng.com

Rappresentante Autorizzato Europa:

CHARNWOOD DYNAMICS LTD.
VICTORIA MILLS
FOWKE STREET
ROTHLEY
LEICESTERSHIRE, LE7 7PJ
UNITED KINGDOM
TEL: +44 (0) 161-230-10-60
FAX: +44 (0) 161-230-18-57